

# Humanwater

ヒューマンウォーター-D



安心でおいしく、健康によい水を、いつでも手軽に…。アルカリイオン整水器「ヒューマンウォーター D」は水のスペシャリストOSGが、30余年の実績とノウハウを活かし開発しました。水へのこだわりで、「人に、暮らしに、贅沢な水」をお届けします。

## 3つの贅沢な電解力。



### 1 水質・用途に合わせて、水を選ぶ10段階のモード

お住まいの地域の水質に合わせ、3段階の電解レベルにそれぞれ3つの電解モード機能を搭載。最適の水が選択できます。

### 2 強力電解ハイレベル円筒形電解槽

電解槽を円筒形にすることにより、電解効率を高いレベルで安定させることを実現しました。

### 3 フリップ・フロップシステム搭載 (PAT.)

フリップ・フロップシステムを採用したことにより、電解槽内のスケール(カルシウム等)付着を防止し、電解槽の洗浄を効率よく行い、常に安定した電解力を維持します。(洗浄時の捨て水がありません。)

## 3つの贅沢な浄水力。



### 1 鉛、トリハロメタン、塩素を徹底除去

鉛除去材入り高性能活性炭+マイクロフィルタにより、残留塩素、カルキ臭、雑菌や鉄サビ、濁りはもちろんのこと、「有害な溶解性鉛」、「発ガン性物質のトリハロメタン」も強力カットします。

### 2 高性能・長寿命のカートリッジで良質な水をつくります

大容量カートリッジは「溶解性鉛、トリハロメタンを6,000L」、「残留塩素を15,000L」の浄化力を有し、1日4L使用(残留塩素除去)で1年間の長寿命。※溶解性鉛、トリハロメタンは1日16L使用で1年間。水質・使用量により異なります。

### 3 浄水全量をご使用いただけます

浄水を使用するときの無駄な排水をなくし、1分間に4Lもの浄水がご使用になれます。

## 身体が求める、3つの水。



### 1 浄水

高性能活性炭+マイクロフィルタが有害な溶解性鉛や発ガン性物質のトリハロメタンを除去。安心でクリアな水をお届けします。

### 2 アルカリイオン水

浄水をさらに電気分解することにより胃腸に優しいアルカリイオン水を生成します。(慢性下痢、消化不良、胃腸内異常発酵、制酸、胃酸過多に有効です)

### 3 酸性水

電気分解により、肌に優しい酸性水を生成。酸性水には、肌をひきしめるアストリンゼント効果があります。毎日のお肌のお手入れに、ひげそり後にもご使用いただけます。

## 3つの贅沢なデザイン・操作性。



### 1 業界初! (2004年2月当社調べ) 操作部に液晶タッチパネルを採用

液晶表示で見やすく、どなたにでも簡単に、使いやすくなりました。使用状況、目的、適正水量やカートリッジ交換時期、機器のトラブルなども、一目で分かるように文字と絵でわかりやすく表示します。



液晶タッチパネル部(イメージ)

### 2 ワンタッチ簡単操作

アルカリイオン水・水道水(ストレート・シャワー)の3つの水がレバーの切り換えで簡単に使い分けができます。

### 3 インテリア性も考えた美しいデザイン

清潔感のあるスノーホワイトのボディに、操作部はシルバーを使用した、高級感のあるデザインにしました。



LIFE



WITH



WATER

# アルカリイオン水、浄水、酸性水。手軽に選べる良質な水。

アルカリイオン水は、用途に合わせて強・中・弱の3種類が選べます。さらに地域の水質に合わせて、それぞれ3段階のモード設定が可能。合計9段階の電解レベルで最適な水をつくります。



- 煮物・アク抜きなどに**  
ゴボウなどのクセの強い野菜のアク抜きが、色・香りを逃がさず早くできます。緑色野菜のゆがきに重宝します。
- 日常飲用、炊飯、お茶やコーヒーなどに**  
ご飯をふっくら炊きあげ、料理の味を引き立てます。また、抽出力があるので、お茶やコーヒーなどに最適です。
- 飲み始めなどに**  
胃腸にいい水なので、目覚めや食間にそのまま一杯。アルカリイオン水を初めて飲まれる方におすすめです。
- お薬の服用**  
不純物を取り除いたキレイな浄水は、薬を服用する時に最適。赤ちゃんのミルクの溶き水にもおすすめです。
- 美容などに**  
お肌を引き締め、美容効果があるため、洗顔後のアストリンゼントに。また、天プラの衣のとき水や種類のゆで水などにも最適です。



## アルカリイオン浄水器 Humanwater ヒューマンウォーターD

医療用具承認番号 21600BZZ00067000

標準価格 **228,900円** (税別価格 218,000円)  
交換用浄水カートリッジ標準価格 **12,600円** (税別価格 12,000円)

※標準取付工事以外で特殊取付けをする場合は、別途料金がかかりますのでご了承ください。

■仕様	
商品名	ヒューマンウォーターD HU-100
電源/消費電力	AC100V 3A 50/60Hz 300W (最大) 約6W (待機時)
類別及び名称	器具機械 (83) 医療用具物質生成器 連続式電解水生成器
本体	(寸法) 幅290mm×奥行146×高さ330 mm (重量) 約7.0kg (満水時)
給水仕様	切替コック接続 3段階切替式
電解方式	連続式電解方式 (流量センサー内蔵)
連続使用最高水温	35℃以下
使用水圧	0.1~0.7MPa
電解	(吐水量 (0.1MPa時)) 浄水: 4.0L/分 (全量吐水) アルカリイオン水: 3.0L/分 酸性水: 1.0L/分 (吐水比率) アルカリイオン水: 酸性水 3:1 (電解レベル) 標準 3段階切替 (電解モード3段階) 計9段階 (連続使用可能時間) 約30分 (標準) 約10分 (強電解モード設定時) (電極洗浄) フリップ・フロップシステム
ろ過流量 (0.1MPa時) 4.0L/分	
使用可能な最小動水圧 0.07Mpa	
浄水	(ろ材の種類) 活性炭、中空糸膜 (浄水能力 <sup>※1</sup> ) 遊離残留塩素 15,000L : 濁り 24,000L 溶解性鉛 6,000L : 総トリハロメタン 6,000L CAT (農薬) 6,000L : 2-MIB (カビ臭) 6,000L (ろ材の交換時期の目安 <sup>※2</sup> ) 1日約41L使用した場合 約12ヶ月 (遊離残留塩素) (除去対象物質によって、交換時期は異なります。また、使用水量、水質によって交換時期の目安が短くなる場合があります)
カルシウム添加	強制溶解型添加方式 添加筒内蔵 (電解補助剤として)
保護装置	電流ヒューズ 6.3A

注1: 家庭用浄水器試験方法 (JIS S 3201) に準拠した試験で除去率80%の値  
注2: 本器の性能を維持するために、1年に1回のカートリッジ交換が必要  
※商品の仕様は、改良のため断りなく変更することがありますので、ご了承ください。  
※ご使用になる前に取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

### メンテナンスシステム

コンピュータ管理によるカートリッジ交換システム

おいしい水をお届けして30余年。当社では、購入日や機種など、お客さまのデータをコンピュータで管理し、カートリッジの交換時期にはお電話でご連絡。定期交換のお知らせとご都合のよい交換日時をご相談させていただきます。また、交換には当社スタッフが、メンテナンスカーで直接ご訪問。交換はもちろん、責任をもって点検するメンテナンスシステムです。(サービスエリアのみ) サービスエリア外についてはカートリッジは郵送となります。詳しくはフリーダイヤルでお尋ねください。

### OSGコンシューマーセンター

OSGコンシューマーセンターでは、専任のスタッフが30余年間に及ぶノウハウを活かして皆さまのご相談にお応えします。交換時期など「ヒューマンウォーター」について、お気軽にご相談ください。

◎転居やご贈答品になされる場合は、前もってフリーダイヤルにお知らせください。

お問い合わせは

**0120-065-631**

受付時間/平日10:00-17:00 (土・日・祝日は休み)

### ■使用上のご注意 安全のため必ずお守りください。

- 初めて飲まれる方は、最初のうち中性に近いアルカリイオン水を少量からお飲みください。
- アルカリイオン水をお使いになる場合は次のことにご注意ください。
  - ・医薬品をアルカリイオン水で飲用しないでください。
  - ・無酸症の方はアルカリイオン水を飲用しないでください。
  - ・飲用して身体に異常を感じたときは飲用を中止し医師に相談してください。
  - ・医師の治療を受けている方、特に腎臓に障害のある方や、身体に異常を感じている場合は使用前に医師に相談してください。
- 酸性水をお使いになる場合は次のことにご注意ください。
  - ・肌の弱い方やアレルギー体質の方は使用前に医師に相談してください。
  - ・酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師に相談してください。
- 水道水の水質基準に適合した水で使用してください。

### ■お求め、お問い合わせは

総発売元

## 株式会社 OSGコーポレーション

東京営業本部 東京都世田谷区野沢2-1-4 (OSG第4ビル)  
大阪本社 大阪市北区天満1-26-3 (OSG本社ビル)  
<http://www.osg-nandemonet.co.jp/>



機能水研究  
振興財団  
日本機能水学会  
賛助会員

「だから私は、OSG」



商品開発部長兼専任  
紺野美沙子



業界初! (2004年2月  
当社調べ)  
液晶タッチパネル  
採用!!



# 人に、くらしに、贅沢な水があります。

## Humanwater

ヒューマンウォーターD



本機は医療用物質生成器として認可 **21600BZZ00067000** を受けており、以下の効能・効果が認められています。

### 効果・効能

- アルカリイオン水 (陰極水) 飲用して慢性下痢・消化不良・胃腸内異常発酵・制酸・胃酸過多に有効です。
- 酸性水 (陽極水) 弱酸性のアストリンゼント (化粧水) として美容用に用いられます。